

HALSWÄRMER MIT INTEGRIERTER CHIRURGISCHER MASKE



Der erste und einzige zertifizierte Antivirus-Halswärmer mit eingebauter chirurgischer Maske in waschbarem, einlagigen Stoff für maximalen Schutz und Atmungsaktivität.

zertifizierter Halswärmer, röhrenförmiger Personenschutz, regulierbar, einach und angenehm zu tragen

der POLAR FLEECE-Stoff hält die Körpertemperatur warm

atmungsaktiver Stoff, für jede Sport- und Bewegungsart geeignet

eingebaute chirurgische Maske, zertifiziertes medizinisches Produkt

unisex, Erwachsene

Produkt kann per Hand und in der Waschmaschine bei 30° mit Waschmittel oder Hygieneife gewaschen werden



Medizinisches Produkt der Klasse 1 Typ 1 mit zertifizierter Filterkennzeichnung in antibakterieller und atmungsaktiver Mikrofaser

Schützt Sie selber und andere vor Viren, indem das Risiko einer Infektionsausbreitung in Epidemien oder Pandemie-situationen verringert wird.

Chirurgische Maske getestet von Abich Laboratory S.r.l. nach UNI EN 14683:2019, UNI EN 10993-1 und UNI EN 10993-5:

Effizienz der bakteriellen Filtration im Ein- und Ausgang (BFE) ≥ 95% (Typ 1) bis zu 20 Waschgängen

Atemwiderstand < 40 bis 20 Waschgängen

Mikrobielle Reinigung Bioburden < 30

Biokompatibilität (Zytotoxizität, Hautreizung und -Sensibilisierung)

Vom Gesundheitsministerium eingetragene Kennzeichnung n° 2015207



WASCHANLEITUNG

Von Hand und in der Waschmaschine mit einer maximalen Temperatur von 30° C mit Reinigungsmitteln oder Hygieneife waschen. Nicht bleichen. Nicht in den Trockner geben, im Freien trocknen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Nicht bügeln.

AUFBEWAHRUNG

Das medizinische Produkt in kühlen Innenräumen und fern von atmosphärischen Stoffen und Dämpfen aufbewahren.

Das medizinische Produkt vor Wärmequellen, freien Flammen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Nach der Benutzung den gewaschenen und vollständig getrockneten Halswärmer in einem Behälter aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht, atmosphärischen Stoffen, Wärmequellen, Pulver, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit schützen.

NICHT ANZUWENDEN

Gebrauch durch Personen, die auf die Stoffe allergisch reagieren, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist.

Gebrauch des Produkts, die im Gegensatz zu den Anwendungen laut 'ANWENDUNG DES PRODUKTS' stehen.

Anwendung des Halswärmers auf verletzter Haut oder einer Wunde.

GEGENANZEIGEN

Das medizinische Produkt kann bei besonders empfindlichen Hauttypen oder Allergikern Irritationen hervorrufen.

Nicht benutzen, wenn Sie allergisch gegen Polyester, Polyamid und Elastomer sind.

ANWENDUNG DES PRODUKTS



Hände mit Seife und Wasser oder Hygienegel waschen, bevor und nachdem Sie den Halswärmer tragen.



Tragen Sie den Halswärmer, indem Sie ihn über den Kopf ziehen und damit Mund und Nase bedecken.



Ziehen Sie den Halswärmer fest und stellen Sie sicher, dass er gut am Gesicht anliegt.

ENTSORGUNG

Die Fertigungsmaterialien der medizinischen Produkte erfordern keine besonderen Entsorgung.

Bei der Mülltrennung müssen die lokalen Normen berücksichtigt werden.

Das Produkt auf keinen Fall unsachgemäß entsorgen.

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

Den Halswärmer wird unter der Achtung genauer Prozesse hergestellt, welche die Nachverfolgbarkeit der Komponenten, die Eingangskontrolle der Materialien, Kontrolle der gesamten Produktionskette, Nachverfolgbarkeit jeder einzelnen Verpackung gewähren.

Größe (mm): 265x240

Maskengröße (mm): 185x160

Material: Polyester 97%, Elastomer 3%

Material Maske: 100% Polyester

Referenzen zu den Zertifizierungen des

Maskengewebes: OEKO-TEX Standard 100

BEWO 070263 TESTEX

Gummizug: Polyamid 60%, Elastomer 40%

Naht: Polyester 100%

Nicht steril

Das Produkt enthält kein Latex

Einzelverpackungen



Made in Italy

